

## TESTE DE UREASE

Teste rápido para diagnóstico de uso in vitro, utilizado para detecção da bactéria H. Pylori, principal causador da gastrite crônica e úlcera duodenal. Usado em pacientes que são submetidos a exames de endoscopia digestiva alta.

### Como funciona

- A técnica consiste em colocar um fragmento de biópsia no microtubo com solução.
- A leitura da reação é preferencialmente nos três minutos.
- Se a H. Pylori estiver presente no fragmento a urease produzida por ela, hidrolisa a ureia e altera a coloração da solução presente no micro tubo conforme abaixo:
- Negativo = **Coloração Amarela**
- Positivo = **Coloração Rosa**

ANVISA

82146060002



### VANTAGENS

- Solução envasada em micro tubos apropriados, com trava antivazamento para evitar contato com ar e perda de qualidade do produto antes do uso.
- **Não necessita refrigeração, pode ser armazenado em temperatura ambiente, até 25°C.**
- Resultado em poucos minutos após o uso.

### Distribuído por:

**CARTMED** Comércio de Artigos Médicos Ltda.

Rua Joaquim dos Reis, 38 | Vila Cruzeiro | São Paulo – SP

e-mail: [adm@cartmed.com.br](mailto:adm@cartmed.com.br) | Site: [www.cartmed.com.br](http://www.cartmed.com.br)

Fone: 11 5611-3330

### Fabricante:

JSL Industria de Testes Ltda EPP